

# 病理画像の納品・閲覧 サービスの導入について

病理画像の納品・閲覧について PidPort（メドメイン社）の運用を開始します。

## 概要

- クラウドを利用した納品「メディア（SSD、HDD、USB メモリ、DVD などの記憶媒体）の納品を中止」
  - 納品時間の短縮
  - メディア費用、輸送費の削減
  - メディアがセキュリティーの上で取り扱いが禁止されているお客様が増えてきており、これに対応します。
- 試験開始前のトライアルや問い合わせ時点でのコンサルティング等にも利用を開始します。
- 納品に、BOX のクラウドをご利用されている場合はご指定の方法により実施させていただきます。

## 注意事項

- 納品時：ダウンロードの案内を受けてから 5 営業日以内に全ファイルのダウンロードを実施ください。
  - 期間内は PidPort の機能で Web 上で WSI 画像の閲覧が自由に可能です。
  - 6 営業日以降はアクセス制限を解除します。その後、弊社での保管を保証するものではありません。
  - WSI のファイル（.ndpi）をダウンロードされた場合は、以下より画像閲覧ソフトをダウンロード（フリー）してご利用ください。
    - [NDP.view2 画像閲覧ソフトウェア U12388-01 | 浜松ホトニクス \(hamamatsu.com\)](#)
  - WSI 画像が不要な場合は、必要箇所を好きなだけスクリーンショット（Ping ファイル）で保存することも可能です。
- コンサルティングでのご利用の場合
  - 画面共有は TEAMS 等の web 会議システムで行います。
    - Web 会議画面 PidPort 画面を同時に立ち上げて準備いただく用をお願いします。
    - PidPort 上でお客様の方からもアノテーションやコメントの書き込みも可能です。
  - コンサルティング終了後はアクセス権を解除します。ファイルのダウンロード、ショット写真等は PidPort 上でおこなってください（アクセス権で実施できないこともあります）

## 参考資料

- お手持ちの大量（数百枚～数千枚）のスライドの WSI 化（標本スライドのデジタル化）をご希望にも対応受託が可能です。
  - ただし、納品はメディアでの納品となります。
- PidPort の詳細
  - [デジタル病理を支援する AI 搭載クラウドシステム「PidPort」 | メドメイン株式会社 \(medmain.com\)](#)
  - 操作マニュアル ; [PidPort \(zendesk.com\)](#)
    - 初期準備、機能紹介をご覧ください。

本案内は JPEG で作成されています。URL を有効とする PDF 版をご希望の方は本 case 内の Attachments をご覧ください。PDF には簡易操作手順が記載されています。




- ① 弊社が発行する左の様な invitation のメールが届きます。  
 (ア) ログインパスワードを設定してください (12 文字以上)  
 (イ) パスワードの制限については初期設定ガイドラインをお読みください。
- ② パスワードが設定されると、ログイン画面 (メールアドレスとパスワード入力) 画面となりますので、必要事項を入力してログインください。


弊社の案内から 5 営業日間アクセス可能です。ダウンロード、スクリーンショット等は 5 営業日以内に実施してください。(事前に機能が絞られている場合があります)



- ③ ログイン  
 (ア) 左の様な画面が開きます。  
 (イ) ■の場所に公開された Group 名が表示されます。

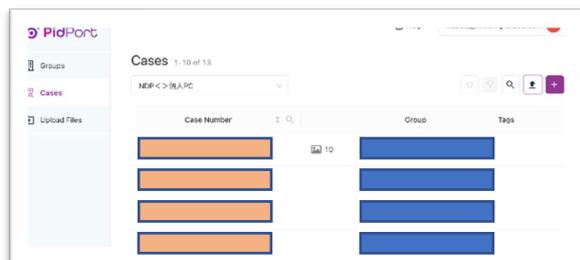


- ④ Group 内の Case 一覧またはファイル情報が表示されます (Case 情報が無い場合は次のファイル一覧表示)  
 (ア) ■は Case (パソコンでいう Folder) で、ご依頼いただいた群ごとに分けて保存する場合があります。

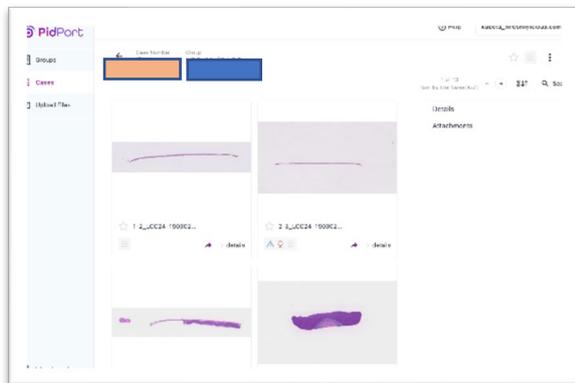


- ⑤ Case を開くと左の様な (画面の大きさで表示される方法が変わることがあります) 画面が表示されます。


- (ア) 閲覧したい WSI をクリック>⑥へ
- (イ) WSI 画像全体のダウンロード方法>⑦へ

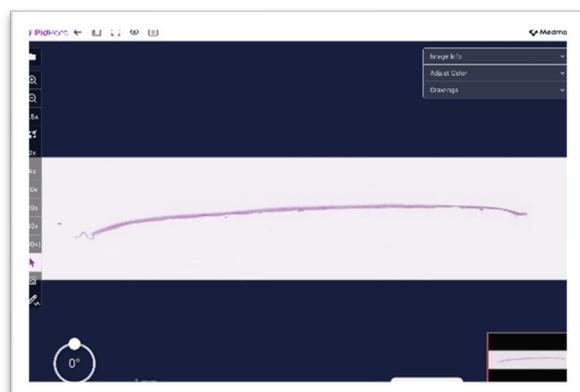

- ⑥ 【閲覧】 WSI 画像が表示されます。  
 (ア) 拡大、縮小、回転、作図等ご自由に利用ください。

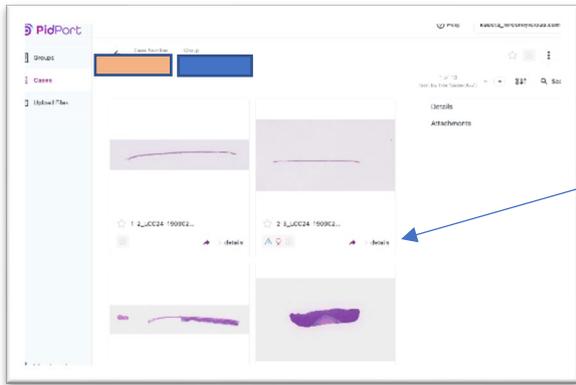

- ⑦ 【ダウンロード】  
(ア) ⑥画面の各画像の右下「detailId」をクリック

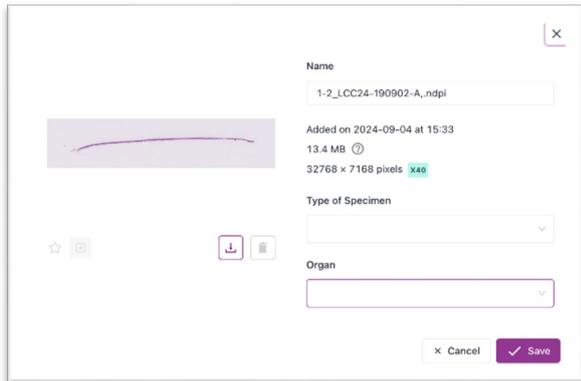

- ⑧  ダウンロードボタンをクリック  
PCのダウンロードフォルダに保存されます。  
(ア) 【Sacve】ではありませんのでご注意ください。  
(イ) ダウンロードは1枚づ実施ください。

その他の操作は、画面右上の「HELP」をご利用ください。